

EcoSept

Principali settori d'impiego:	Disinfettante per il lavaggio a macchina di strumentario termolabile e dispositivi medici non invasivi.
Proprietà:	<p>EcoSept è un disinfettante non schiumogeno a base di 2-fenossietanolo.</p> <p>Strumenti chirurgici in acciaio inossidabile, così come utensili per anestesia e zoccoli, che possono essere trattati con il metodo termochimico non vengono intaccati da EcoSept.</p> <p>In caso di strumentario termoresistente è comunque preferibile effettuare una disinfezione termica al termine del ciclo di lavaggio con detergenti tipo DETERLIQUID C2.</p>
Impiego:	<p>EcoSept va impiegato in fase di disinfezione successivamente alla fase di lavaggio,</p> <p>Dall'apertura della confezione il prodotto va utilizzato entro 6 mesi.</p>
Dosaggio:	<p>In macchine per il lavaggio automatico (attraverso l'apposita pompa dosatrice): 10 ml/l</p> <p>L'efficacia di disinfezione completa si ottiene in lavaggi a 60°C con un tempo di mantenimento minimo di 10 minuti.</p> <p>Si consiglia di risciacquare con acqua demineralizzata.</p>
Dati tecnici:	<p>Peso specifico a 20°C: 1,087 g/ml</p> <p>pH 8,45 (sol.1%)</p>
Componenti:	50-90% 2-fenossietanolo
Marcatura CE:	risponde ai requisiti della Direttiva Europea 93/42/CE s.m.i. per i dispositivi medici
Stoccaggio:	<p>A temperatura ambiente, lontano dai raggi diretti del sole e da fonti di calore.</p> <p>Il prodotto immagazzinato in modo corretto, in confezionamento integro, ha una validità di 3 anni.</p>
Pericolosità, informazioni di sicurezza e smaltimento:	Fare riferimento alla scheda dati di sicurezza