

Lubrificante

neodisher® IP Konz

Lubrificante per ferri chirurgici.

Per l'impiego in macchine speciali. Test tossicologici certificati.



Campi di

applicazione

Lubrificante nel trattamento meccanico di ferri chirurgici nell'ultimo ciclo di risciacquo.

Caratteristiche:

Neodisher IP Konz è un prodotto concentrato per il trattamento dei ferri chirurgici a base di oli bianchi medicali purificati ed emulsionanti.

Neodisher IP Konz viene impiegato in termodisinfettori per il lavaggio dei ferri chirurgici.

Residui di neodisher IP Konz non si accumulano né creano patine resinose durante la fase di sterilizzazione sulle superfici in acciaio.

Grazie alla sua composizione, neodisher IP Konz è particolarmente adatto ad essere impiegato sullo strumentario prima che questo venga sterilizzato in quanto sulla sottilissima pellicola oleosa che si forma non permangono germi di alcun tipo.

Nel lavaggio successivo tale pellicola viene completamente eliminata, tanto che il trattamento con neodisher IP Konz deve essere ripetuto dopo ogni ciclo di disinfezione e di lavaggio.

Neodisher IP Konz non è adatto per strumentario sterilizzato con aria calda.

Neodisher IP Konz è sottoposto ad un controllo finale batteriologico ed è privo di germi vegetativi.

Utilizzo e dosaggio:

Per il trattamento automatizzato dello strumentario :

1.2 ml/l di lubrificante neodisher IP Konz, attraverso l'apposita pompa dosatrice nell'ultimo ciclo di risciacquo.

L'acqua del risciacquo dovrebbe avere una temperatura di almeno 50 °C.

Per la lubrificazione in ammollo non si consiglia l'impiego di neodisher IP Konz a causa di possibili contaminazioni incontrollate.

In alternativa si può far seguire al trattamento a macchina una lubrificazione manuale con neodisher IP Spray.

Perizie tecniche:

Sono state redatte le seguenti perizie tossicologiche (verifiche in accordo con le EN ISO 10993-1) (GT 4302/1-84)

- Reazione primaria di irritazione della pelle su conigli.
- Test di irritazioni degli occhi su coniglio.
- Applicazione perorale su ratto.

Registrazioni:

I principi attivi sono registrati FDA (Nr. 176210, 177120 e 172878)

Dati tecnici:

Densità specifica (20 °C) : 0,9 g/cm³

Viscosità (concentrata, 20 °C): <50 mPas



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG -
Mühlenhagen 85, D - 20539 Hamburg

Telefon: 040-789 60 - 0 - E-mail: info @drweigert.de
Telefax: 040-789 60 -120 Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

Lubrificante

neodisher® IP Konz

Lubrificante per ferri chirurgici.

Per l'impiego in macchine speciali. Test tossicologici certificati.



Ingredienti:	Ingredienti in accordo con le direttive 89/542/CEE per i detergenti: 15 – 30 % tensioattivi non ionici 30 % idrocarburi alifatici (olio di paraffina DAB) inoltre agenti conservanti
Marcatura CE:	neodisher IP Konz risponde ai requisiti di legge per i dispositivi medici e le modificazioni contenute nella Direttiva Europea 93/42 CE sui prodotti medicali.
Biodegradabilità:	La biodegradabilità è conforme alle disposizioni della legge tedesca sui detergenti e detersivi del 19 marzo 1987 in concomitanza con le direttive relative alla biodegradabilità di detergenti e detersivi relative ai tensioattivi anionici e non ionici del 30 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni del 4 giugno 1986 (biodegradabilità minima del 90 %)
Fisiologia:	Il prodotto non contiene pesticidi né idrocarburi di cloro.
Il punto verde:	Neodisher IP Konz è conforme alle normative sugli imballaggi. Il contenitore vuoto può essere smaltito attraverso il sistema Duale tedesco AG (DSD).
Informazioni per lo stoccaggio:	Il prodotto è sensibile al gelo. A temperature > 10 °C si può verificare un intorbidamento reversibile. Utilizzabile per 2 anni se stoccato nel rispetto delle indicazioni fornite.
Pericolosità e informazioni di sicurezza	Neodisher IP Konz non è soggetto a contrassegno in base alle norme concernenti le sostanze pericolose Direttive 1999/45. Manipolando il prodotto concentrato - consigliamo di seguire i seguenti consigli di prudenza: S25 Evitare il contatto con gli occhi. Per ulteriori informazioni, consultare la Scheda di Sicurezza.

MB 4306 GB/2-2
09/03



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG -
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: 040-789 60 - 0 – E-mail: info @drweigert.de
Telefax: 040-789 60 -120 Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.